



- 130
- EFFICACE : perfetta immobilizzazione grazie al sistema di cinghie e di regolazione a livello della spalla.
- COMODO : tessuto 3D aerato.
- PRATICO : modello unico per spalla destra o sinistra, con solo 2 tagli.

**Indicazioni :**

- Traumatismi non complicati della spalla :
  - lussazione anteriore della spalla,
  - frattura dell'omero non articolare e senza spostamento,
  - lussazione acromio-clavicolare non complicata.
- Immobilizzazione del gomito dopo una lussazione.
- Fratture del trochite, della testa omerale, del trochine (indicazioni non chirurgiche).
- Immobilizzazione post chirurgia d'instabilità.
- Frattura della cuffia dei rotatori in fase acuta.
- Periartrite scapolo-omeroale.
- Paralisi del plesso brachiale.
- Rieducazione dell'articolazione scapolo-omeroale.
- Immobilizzazione antalgica della spalla dopo una fase infiammatoria (reumatismo acuto, poliartrite reumatica).

**Controindicazioni :**

Traumatismi complicati della spalla : frattura senza spostamento, frattura comminativa, frattura con lesione nervosa o vascolare, rottura grave del legamento. Non mettere il prodotto direttamente sulla pelle lesa.

**Precauzioni :**

Indossare il prodotto con l'aiuto dello specialista che lo ha prescritto o rilasciato. Consultarlo in caso di fastidio. Seguire metodicamente i consigli di posizionamento in 6 fasi qui sotto e basarsi sui contrassegni in cifre segnati sul prodotto. Per ragioni di igiene e di efficacia, non riutilizzare il prodotto per un altro paziente. Conservare il prodotto nell'imballaggio originale, al riparo dalla luce.

**Manutenzione :**

- Vedere l'etichetta del prodotto.
- Non utilizzare prodotti detergenti, ammorbidenti o aggressivi (prodotti colorati).
- Premere senza torcere
- Asciugare lontano dalle fonti di calore

**Composizione :**

Vedere etichetta prodotto.

**POSIZIONAMENTO IN 6 FASI :**

Per facilitare il posizionamento, rispettare i contrassegni in cifre segnati sulle cinghie e il colore grigio (lato sinistro) o nero (lato destro).  
 Notare che il posizionamento richiede l'aiuto di un'altra persona.

**• Per la spalla sinistra :**

- FASE 1 : Ripiegare le estremità delle 3 cinghie nascondendo le superfici a velcro nere.
  - FASE 2 : Posare il cuscinetto imbottito sulla spalla, con la cucitura grigia visibile all'esterno.
  - FASE 3 : Posizionare il braccio ad angolo retto sul gilet. Sostenerlo rialzando la cinghia LEFT/GAUCHE 1 e fissandola a livello della spalla. Quindi rialzare la cinghia LEFT/GAUCHE 2 di sbieco per mantenere bene la mano. Attenzione, fare in modo che il cuscinetto imbottito sia centrato a livello della spalla.
  - FASE 4 : Prendere la cinghia LEFT/GAUCHE 3", fissarla sull'avambraccio, quindi riportarla indietro attaccandola una prima volta con il gancio ruotante della spalliera e una seconda volta sulla spalliera con il gancio della cinghia.
  - FASE 5 : Afferrare la cinghia LEFT/GAUCHE 4, riportarla sul davanti del corpo e fissarla sull'avambraccio prendendo il gomito.
  - FASE 6 : Regolare la spalla.
- Non esitare ad effettuare più volte le regolazioni, per una perfetta immobilizzazione.

**• Per la spalla destra :**

- FASE 1 : Ripiegare le estremità delle 3 cinghie nascondendo le superfici a velcro grigie.
  - FASE 2 : Posare il cuscinetto imbottito sulla spalla, con la cucitura nera visibile all'esterno.
  - FASE 3 : Posizionare il braccio ad angolo retto sul gilet. Sostenerlo rialzando la cinghia RIGHT/DROIT 1 e fissandola sulla spalla. Rialzare quindi la cinghia RIGHT/DROIT 2 di sbieco per mantenere la mano. Attenzione, fare in modo che il cuscinetto imbottito sia centrato a livello della spalla.
  - FASE 4 : Prendere la cinghia RIGHT/DROIT 3, fissarla all'avambraccio, quindi riportarla indietro attaccandola una prima volta con il gancio ruotante della spalliera e una seconda volta sulla spalliera con il gancio della cinghia.
  - FASE 5 : Afferrare la cinghia RIGHT/DROIT 4, riportarla sul davanti del corpo e fissarla sull'avambraccio prendendo il gomito.
  - FASE 6 : Regolare la spalla.
- Non esitare ad effettuare più volte le regolazioni, per una perfetta immobilizzazione.

Conservare queste istruzioni.