

# MANUALE DI ISTRUZIONI

## Maniglie per il bagno Ina

### 1. Dettagli tecnici

**AVVERTENZA:** Pericolo di limiti non sicuri. Utilizzare solo nei limiti descritti nel presente manuale.

Produttore	Vermeiren			
Indirizzo	Vermeirenplein 1 / 15 B-2920 Kalmthout			
Tipo	Maniglie per il bagno			
Modello	Ina 30 (30 cm)	Ina 40 (40 cm)	Ina 50 (50 cm)	Ina 60 (60 cm)
Lunghezza	376 mm	476 mm	576 mm	676 mm
Distanza dalla maniglia al muro (Altezza)	80 mm			
Diametro llangia	70 mm			
Peso	0,55 kg	0,65 kg	0,67 kg	1,00 kg
Carico massimo	max. 120 kg			
Temperatura conservazione	+5°C - +41°C			

La casa produttrice si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche. Tolleranza +/- 15 mm / kg

Ringraziamo per la fiducia accordataci con l'acquisto di un articolo di nostra produzione. Prima di utilizzare le maniglie per il bagno leggere attentamente le presenti istruzioni, allo scopo di acquisire familiarità con il prodotto.

Le istruzioni contengono inoltre indicazioni per la pulizia e la manutenzione delle maniglie per il bagno. Si prega di tenere presente che il rispetto di queste indicazioni consentirà di mantenere la sedile perfettamente efficiente e funzionante anche dopo anni.

Per qualsiasi chiarimento, rivolgersi al rivenditore specializzato.

Per individuare il centro assistenza o il rivenditore specializzato più vicino, contattare il centro Vermeiren. Nell'ultima pagina del manuale, è disponibile un elenco di centri Vermeiren autorizzati.

### 2. Significato dei simboli



Peso massimo



Conformità CE

### 3. Controllo dopo la consegna

Disimballare il prodotto e verificare che tutti i componenti siano stati consegnati. Devono essere incluse le parti seguenti:

- Maniglie per il bagno
- 6 viti
- 6 Fischer per il muro
- 2 guarnizioni in gomma
- Manual

Verificare che non si siano prodotti danni durante il trasporto. In tal caso procedere come segue:

- Rivolgersi al corriere.
- Far certificare i danni

- Informare immediatamente il corriere.

### 4. Utilizzo previsto

Le maniglie per il bagno sono disponibili in differenti lunghezze da cm. 30 a cm. 60. Sono disegnate come elementi di supporto. Possono essere utilizzate ovunque (\*) , incluso in condizioni di umidità.


(\*) Da applicare su muri adatti a sopportare le maniglie montate.

### 5. Assemblaggio

**ATTENZIONE:** Rischio di lesioni – Assicurarsi che le maniglie siano saldamente montate al muro, per garantirne la sicurezza e la forza.

**ATTENZIONE:** Rischio di lesioni – Assicurarsi che le maniglie siano montate su di un muro abbastanza solido, per garantire la sicurezza e la resistenza delle maniglie.

Assicuratevi che le maniglie per bagno Ina siano installate come da seguente manuale.

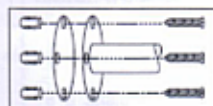

1. Segnare la posizione corretta dei fori della maniglia sul muro e collocare le

maniglie nella giusta posizione.

2. Forare il muro con gli appositi strumenti.
3. Montare le spine nei fori.
4. Montare le due guarnizioni di gomma.
5. Posizionare la maniglia nella posizione desiderata contro il muro.
6. Avvitare le viti con l'utensile necessario. (Verificare che le viti siano in acciaio Inox, utilizzato per gli accessori da bagno).

Se avete dei dubbi contattate un professionista. Utilizzate per l'installazione il materiale incluso nella confezione.

### 6. Istruzioni per la sicurezza

- Pericolo di ustioni. Prestare attenzione durante l'uso in ambienti caldi o freddi (esposizione al sole, freddo estremo, sauna, ecc.) per un determinato periodo di tempo e quando si tocca il dispositivo.
- **La portata massima è di Kg.120.**
- Assicurarsi che le maniglie sia fissate saldamente ed in totale sicurezza.
- Assicurarsi che le maniglie siano fissate ad un muro forte abbastanza.
- Assicurarsi che non ci siano cavi elettrici o altri tubi nelle zone in cui montare le maniglie.
- La casa produttrice declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni o lesioni derivanti da sovraccarico, collisioni o altri usi impropri.

### 7. Manutenzione, Controllo, Pulizia

Per il manuale di manutenzione del Maniglie per il bagno consultate il sito web Vermeiren: [www.vermeiren.be](http://www.vermeiren.be).