



**SCHEDA PRODOTTO  
FERMAPOLSI**

**DESCRIZIONE GENERALE**

Fermapolsi per trattenere polsi e caviglie di pazienti agitati evitando così movimenti improvvisi e ferite accidentali. La soffice imbottitura garantisce comfort al paziente. Consente di liberare e fissare rapidamente l'arto senza dover sciogliere il fermapolsi dai supporti del letto.

**NORMATIVE DI RIFERIMENTO**

Direttiva CEE 93/42, Direttiva 47/2007.  
Regolamento CE 1907/2006 REACH

**NOMENCLATURA**

COD ART	CND	N. REP
AI FERM POL ADU	M030599	132266/R
AI FERM POL ADU RIN	M030599	132965/R

**ISTRUZIONI PER CONSERVAZIONE E MAGAZZINO**

Immagazzinare in luogo fresco e asciutto a temperatura ambiente e lontano da fonti di calore. Non esporre a luce solare diretta, luce UV e lampade fluorescenti. Se il confezionamento è danneggiato o bagnato scartare il prodotto. Non utilizzare oltre la data di scadenza indicata sul confezionamento.

**VITA UTILE DEL PRODOTTO**

5 anni

**PRECAUZIONI E SICUREZZA**

Attenzione: il prodotto è combustibile. La combustione può produrre fumi tossici: monossido di carbonio, ossido di carbonio, acidi organici. Mezzi estinguenti: acqua, polvere, CO<sub>2</sub>.

**AVVERTENZE**

Non applicare direttamente su pelle irritata/lesionata. Non stringere eccessivamente le parti anatomiche che devono essere fissate. Non utilizzare su parti del corpo non previste nella destinazione d'uso. Dopo l'applicazione controllare periodicamente la cute per escludere l'insorgenza di irritazione e verificare l'integrità e il fissaggio del dispositivo

**COMPOSIZIONE**

Rivestimento: Poliestere, Poliestere e cotone (Modello Pediatrico)

Imbottitura: schiuma di Poliuretano

Anello di chiusura: Nylon (Modello Rinforzato)

Lacci: Poliestere

Il rivestimento e l'imbottitura del fermapolsi sono in materiale traspirante per prevenire l'irritazione della pelle.

Per il riutilizzo sullo stesso paziente lavare in acqua con sapone neutro ad una temperatura non superiore a 30°C e risciacquare accuratamente.



GARDENING S.R.L. - VIA LUCCOLI 23/6A-7 - 16123 GENOVA - ITALY - TEL. 010-4554689 r.a. - FAX. 010-4075088  
P.IVA 00455430108 - C.C.I.A.A. N. 216172 - POSIZ. M. GE014348 - TRIB. GE 29809 - 47293 -CAP.SOC. EURO 278.722 I. V.  
**SISTEMA DI QUALITA' CERTIFICATO ISO 9001 ISO 13485**





## DIMENSIONI

ITEM	LUNGHEZZA MIN (cm)	LARGHEZZA MIN (cm)	CHIUSURA
RINFORZATO	168	7.5	Anello di sicurezza con lacci
ADULTI	168	7.5	Lacci

## CONFEZIONE

Rinforzato: cartone da 80 pezzi.

Adulti: cartone da 60 pezzi.

Pediatrico: cartone da 120 pezzi.

## ISTRUZIONI PER L'USO

1. Verificare che la pelle con cui deve entrare in contatto il fermapolsi non sia irritata e non presenti lacerazioni
2. Posizionare il fermapolsi attorno al polso o alla caviglia del paziente regolando con la chiusura in Velcro® la presa attorno all'arto e contrapponendo i lacci in direzione longitudinale
3. Passare il laccio all'interno dell'anello di chiusura di sicurezza ove presente (modello Strong)
4. Assicurare il laccio alla struttura del letto.
5. Controllare periodicamente lo stato della cute e l'integrità e il fissaggio del dispositivo.

## CONTROLLO DI QUALITÀ

### DIFETTI VISIBILI

Difetti critici: dimensioni e forma sbagliate, sporco non rimovibile, cattiva finitura dei bordi, integrità confezionamento.

Difetti minori: sporco rimovibile, stampa confezionamento chiara.

DIFETTI EVIDENZIATI	NORMATIVA	METODO DI VERIFICA	PIANO DI CAMPIONAMENTO	LIVELLO DI ISPEZIONE (ASTM 2859 / MIL STD 105D)	LIVELLO DI QUALITÀ ACCETTABILE (AQL)
Difetti critici	PROCEDURE INTERNE	Ispezione visiva	ISO 2859-1	GI	2.5
Difetti minori	PROCEDURE INTERNE	Ispezione visiva	ISO 2859-1	GI	4.0

## COMPATIBILITÀ CHIMICA, BIOLOGICA ED ECOLOGICA

Poliestere, cotone, schiuma di poliuretano e nylon ECO-COMPATIBILI secondo certificato AITEX "Textiles de confiance, test sustancias nocivas segun Öko-Tex standard 100".

Schiuma di poliuretano CHIMICAMENTE COMPATIBILE secondo certificato EUROPUR.

Poliestere BIO-COMPATIBILE secondo certificato DR.ECHEVARNE.

## MODALITÀ DI SMALTIMENTO

Da smaltire come rifiuto ospedaliero secondo la normativa vigente.

## OFFICINA DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO:

C.V. MEDICA S.L.

Pol. Industrial LA PLANA .C/ PONENT, 1

43424 – SARRAL (TARRAGONA)

SPAGNA

GARDENING S.R.L. - VIA LUCCOLI 23/6A-7 - 16123 GENOVA - ITALY - TEL. 010-4554689 r.a. - FAX. 010-4075088  
P.IVA 00455430108 - C.C.I.A.A. N. 216172 - POSIZ. M. GE014348 - TRIB. GE 29809 - 47293 -CAP.SOC. EURO 278.722 I. V.

**SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001 ISO 13485**

