

medi

ULTIMATE
COMPRESSION
TECHNOLOGY

medi. ultimate compression technology

Prodotti efficaci e all'avanguardia

Il marchio ultimate compression technology contraddistingue i prodotti medi nell'ambito della medicina, nello stile di vita dei pazienti e nello sport. medi significa 60 anni di esperienza nella ricerca e nella realizzazione di prodotti compressivi made in Germany. Il processo di produzione ultimate compression technology garantisce la compressione medicalmente corretta dei prodotti che esercitano sul corpo documentati effetti positivi sulla salute, sulle prestazioni fisiche e sul benessere dei pazienti.

mediven®

La corretta manutenzione:

Per conservare a lungo le caratteristiche terapeutiche della calza compressiva mediven bisogna lavarla ogni giorno. Si consiglia di usare, per il lavaggio a mano o in lavatrice (capi delicati a 40 °C) un detersivo per lana, senza agenti sbiancanti e senza ammorbidenti. Le calze compressive mediven vanno lavate assieme a capi d'abbigliamento dello stesso colore. Non asciugare la calza compressiva esponendola a fonti di calore dirette, ma in asciugatrice usando un ciclo

delicato, o semplicemente all'aria. La calza compressiva mediven non va pulita chimicamente, né trattata con uno smacchiatore. Dopo il lavaggio si raccomanda di tirare il tessuto per riportarlo alla forma iniziale.



Avvertenze speciali:

- Usare le calze compressive mediven solo dopo aver consultato il medico curante. La calza deve essere prescritta solo da personale specializzato.
- Nel caso in cui durante l'uso della calza compressiva compaiano dolori o irritazioni cutanee, sfilare immediatamente la calza e consultare il medico o il rivenditore specializzato.
- Il cinturino del collant compressivo mediven è incluso nella confezione. Se necessario, inserirlo nell'asola preposta e regolarlo secondo la propria misura.
- Se la pelle è umida, applicare sul piede del talco per facilitare lo scorrimento della calza.
- Per indossare la calza, andrebbero usati, se possibile, dei guanti di gomma. Successivamente con il palmo della mano è possibile stendere la calza verso l'alto fino ad eliminare tutte le grinze e le piegature.
- Il mediven Butler si è dimostrato un ausilio ideale per indossare le calze e i collant compressivi mediven. Il mediven Butler è disponibile nei negozi specializzati.
- Nelle persone particolarmente sensibili, possono comparire delle irritazioni della pelle dovute al rivestimento in silicone e alla traspirazione cutanea.
- Attenzione in caso di unghie appuntite o quando si portino anelli! Per evitare di danneggiare il delicato tessuto, si prega di afferrare la calza sempre con molta cautela.

- Si prega di prestare attenzione anche alla struttura interna delle calzature, poichè un rivestimento o un'imbottitura difettosi aumentano l'attrito e possono facilmente danneggiare la calza.
- Si prega di non cercare di riparare la calza da soli; se ne potrebbe compromettere la qualità e l'efficacia.
- Le pomate, la traspirazione cutanea e altri fattori ambientali possono compromettere la durata e l'efficacia clinica della calza.

Composizione dei materiali:

Informazioni precise a tale riguardo sono riportate sull'etichetta cucita all'interno della calza compressiva mediven.

Istruzioni per indossare le calze compressive mediven a punta aperta:

- Indossare la calza compressiva mediven al mattino appena alzati.
- Infilare il piede nel calzante di seta mediven fornito come accessorio.
- Infilare la calza sul calzante di seta e distribuirla uniformemente verso l'alto. Prestare attenzione a non torcere la calza e a non tirarla troppo in lunghezza. Per estrarre il calzante in seta, bisogna tirare indietro la calza dalla punta fino a scoprire il tallone. Nell'eseguire questa manovra fare attenzione a non formare grinze e pieghe in quanto potrebbero causare restringimenti dolorosi. A questo punto, il calzante in seta mediven si può facilmente sfilare.
- Successivamente tirare la calza di nuovo sul piede, distribuendola uniformemente fino alla base delle dita. Accertarsi che la calza sia correttamente posizionata sul tallone.

Istruzioni per indossare le calze compressive mediven a punta chiusa:

- Indossare i guanti di gomma e infilare la mano nella calza, afferrare il tallone e rivoltare la calza. A questo punto bisogna tirare la calza sul piede fino al tallone. Afferrare il tessuto dello strato superiore al centro del piede e sollevarlo in corrispondenza del tallone. Afferrare di nuovo con entrambe le mani la parte della calza che pende verso il basso e sistemarla uniformemente sulla gamba. Gradualmente sistemare la calza fino al ginocchio. Afferrare di nuovo il tessuto e sollevarlo in corrispondenza del ginocchio. Afferrare di nuovo il tessuto e sollevarlo in corrispondenza del ginocchio. Controllare adesso che tutta la calza sia correttamente posizionata.

Avvertenze per la conservazione:

Le calze compressive mediven sia standard che su misura hanno una durata massima d'uso di 6 mesi.

Indicazioni

- varicosi primarie e secondarie
- varici e edemi in gravidanza
- insufficienza venosa profonda
- tromboflebiti (superficiali)
- e anche Pregresse flebiti guarite
- nella profilassi antitrombotica e nelle trombosi pregresse
- sindrome post-trombotica
- insufficienza venosa cronica, stadio I-III di Widmer
- edemi post-operatori e post-traumatici
- linfedema e lipoedema
- edemi ciclici idiopatici
- angiodisplasia
- a sostegno della terapia sclerosante, dopo interventi di flebochirurgia

- situazioni di stasi circolatoria conseguenti a immobilità (sindrome da stasi su base artrosica, paresi ed emiparesi delle estremità)
- nella profilassi dei disturbi venosi.

La classe di compressione della calza va stabilita dal medico. Per garantire il buon esito della terapia, si consiglia di sottoporsi a regolari controlli medici.

Controindicazioni:

Secondo le direttive della Società Tedesca di Flebologia (Deutsche Gesellschaft für Phlebologie), si deve distinguere in:

Controindicazioni assolute:

- arteriopatia ostruttiva periferica in stato avanzato
- insufficienza cardiaca scompensata
- flebiti settiche
- Phlegmasia cerulea dolens

Controindicazioni relative:

- dermatosi umide,
- intolleranza al materiale delle calze compressive
- disturbi della sensibilità degli arti
- neuropatie periferiche in stato avanzato (es. da diabete mellito)
- poliartrite cronica primaria