



Nastri da sutura

Descrizione:

I nastri da sutura Steri-Strip™ 3M™ sono costituiti da materiale poroso non tessuto. Sono inoltre dotati di filamenti di rinforzo e rivestiti di adesivo ipoallergenico.

I nastri da sutura color pelle Steri-Strip™ 3M™ sono costituiti da materiale poroso non tessuto e sono rivestiti di adesivo ipoallergenico. I nastri da sutura elastici Steri-Strip™ 3M™ sono costituiti da materiale poroso non tessuto, elastico. Sono intesi per consentire l'espansione dei tessuti e il movimento e sono rivestiti di adesivo ipoallergenico.

Uso previsto:

I nastri da sutura adesivi Steri-Strip sono indicati per l'utilizzo come dispositivo di sutura cutanea nel trattamento di lacerazioni e incisioni chirurgiche. I nastri da sutura adesivi Steri-Strip possono anche essere utilizzati unitamente ai fili di sutura e punti metallici o dopo la loro rimozione allo scopo di fornire un supporto addizionale alla ferita.

Controindicazioni:

1. L'uso dei nastri da sutura adesivi Steri-Strip è controindicato ove non sia possibile ottenere un'adesione adeguata, a causa, ad esempio, della presenza di essudato, oli cutanei, umidità o peluria.
2. L'uso dei nastri da sutura adesivi Steri-Strip su ferite infette è controindicato.
3. L'uso dei nastri da sutura adesivi Steri-Strip è controindicato su ferite ove la difficoltà di avvicinamento dei lembi mediante le dita o un paio di pinze indichi la presenza di una tensione eccessiva.

Avvertenze:

1. L'insorgenza di edema postoperatorio può causare lacerazioni cutanee, formazione di vesciche o perdita di adesione alle estremità delle suture cutanee.
2. La rimozione di qualsiasi nastro adesivo chirurgico o nastro da sutura adesivo applicati alla cute del paziente può dar luogo all'asportazione dello strato più superficiale della cute.
3. Come per tutti i prodotti adesivi applicati alla cute, una piccola percentuale di individui può presentare ipopigmentazione o iperpigmentazione dopo la rimozione.
4. Nei test eseguiti su volontari sani sono stati riscontrati episodi occasionali di lieve acne e follicolite.

Precauzioni:

1. Per ottenere una buona adesione la cute deve essere pulita, asciutta e priva di oli cutanei.
2. Non applicare i nastri da sutura sotto tensione. In caso di eccessiva tensione della cute durante l'applicazione, potrebbero verificarsi lievi lesioni cutanee, formazione di vesciche o perdita di adesione.

Istruzioni per l'uso:

1. Pulire e asciugare la cute. Se lo si desidera, è possibile applicare uno strato sottile di tintura composta di benzoino per migliorare l'adesione della sutura cutanea.
2. Aprire la confezione. Rimuovere il cartoncino e la linguetta alla sua estremità.
3. Afferrare l'estremità della sutura cutanea e staccarla dal cartoncino sollevandola.
4. Quando si usano i nastri da sutura adesivi in assenza di suture vere e proprie o di punti metallici, avvicinare i lembi della ferita usando le dita o una pinza. Collocare le suture adesive trasversalmente sulla ferita, verificando che l'applicazione non crei tensione a livello cutaneo.
5. Suddividere in sezioni le ferite di dimensioni maggiori per distribuire la tensione. Spaziare tra loro le suture cutanee di circa 3 mm.
6. È possibile applicare ulteriori suture adesive parallelamente alla ferita, a circa 12 mm dalle estremità delle suture cutanee precedentemente applicate. Ciò può contribuire a ridurre la tensione in prossimità delle estremità delle suture.

Confezionamento:

1. I nastri da sutura adesivi sterili vengono forniti su cartoncini e confezionati in buste singole sterili.
2. Conservare a temperatura ambiente. Evitare l'esposizione a calore o umidità eccessivi.
3. Sterili purché la busta non sia stata aperta o danneggiata.

 Non utilizzare se la confezione è danneggiata o aperta

 Questo prodotto e la confezione non contengono lattice in gomma naturale