

## Avvertenze

Prima di effettuare qualsiasi operazione, controllare visivamente l'integrità del prodotto. Qualora presenti anomalie, contattare il punto vendita presso il quale si è effettuato l'acquisto. Intermed S.r.l. non assume alcuna responsabilità per l'uso improprio del dispositivo.

## Caratteristiche

- Fascia di sostegno con cuscinetto per tendine rotuleo.
- Cinghia di stabilizzazione con doppio sistema di chiusura a velcro.

## Indicazioni

- Tendiniti.
- Tendinopatie della rotula.
- Processi infiammatori.

## Precauzioni

- Le indicazioni terapeutiche riportate non costituiscono, ovviamente, elenco esaustivo. Per ulteriori e più specifiche indicazioni fare sempre riferimento a valutazione del medico specialista.
- Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. In caso di reazioni allergiche, rivolgersi immediatamente al proprio medico curante.
- Il dispositivo medico deve essere impiegato a seguito di valutazione clinica effettuata da un medico specialista il quale, dopo la diagnosi, individuerà gli eventuali adattamenti nel rispetto delle caratteristiche morfologiche dell'arto del paziente. Tali adattamenti e la successiva applicazione del sostegno devono avvenire a cura di personale tecnico specializzato.
- Si raccomanda di verificare con regolarità l'integrità del sostegno e la tenuta dei sistemi di chiusura. Su indicazione ed a parere del medico specialista, effettuare controlli periodici per la verifica dell'efficacia funzionale del sostegno.
- Si sconsiglia, per motivi di igiene ed efficacia terapeutica, il riutilizzo del sostegno su altri pazienti.

## Conservazione e smaltimento

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

## Lavaggio



## Composizione

Tessuto esterno	EVA
Tessuto interno	Poliestere
Cinghia di stabilizzazione	Poliestere
Chiusure	Nylon
Cuscinetto	Gomma
Fibbie	Poliossimetilene
La fascia di sostegno contiene lattice.	

## Istruzioni d'uso

- Selezionare il sostegno secondo le indicazioni del medico specialista o del personale tecnico specializzato.
- Allentare la cinghia di stabilizzazione.
- Posizionare il tutore avendo cura di far coincidere il cuscinetto con la parte inferiore della rotula.
- Completare l'operazione assicurando il sostegno alla compressione desiderata tramite cinghia di stabilizzazione.